

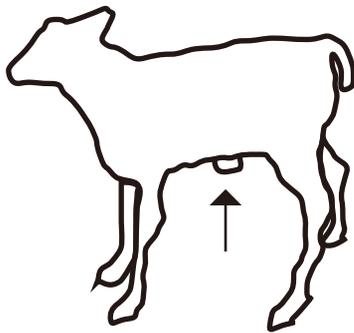


## 【処置セットの使用法】

- ①起立位の状態ではルニア内容を押込み、周囲に両面テープを貼り付けた固定板で仮押さえします。

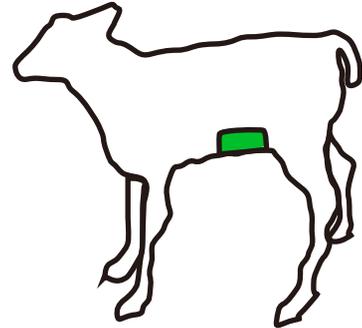


ヘルニア内容を押込み…


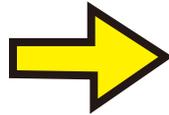


固定板で仮押さえします

- ②固定板を抑えるようにプラスチックネットを身体に巻き付けます。

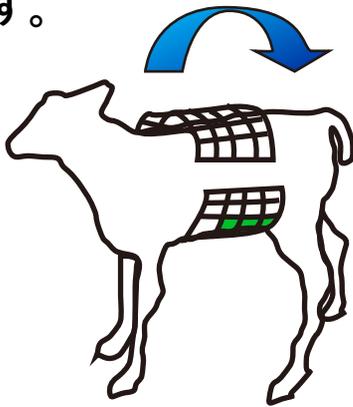

ネットで固定板を押さえつけるようにし…

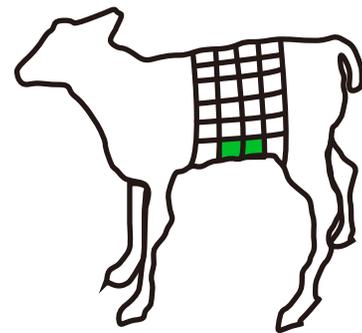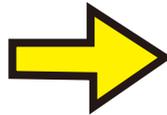


しっかりと巻きつけます

- ③マジックテープを図のように通し固定します。

2目以上またいでテープを通します

前後両端と、固定板の中央を通る線上に装着します

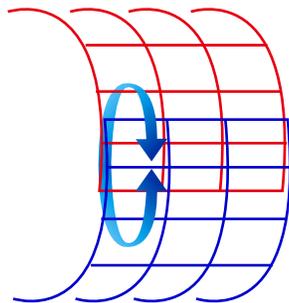

※症状によっては外科手術でなければ治らない場合もあります。必ず獣医師に相談の上、処置してください。  
※本セットを使用した非観血法による処置の場合、平均的な装着期間は約2週間です。